

# Cow•Pro

Powered by  ixorigue

## Guía de instalación



# ÍNDICE

- 01** Materiales necesarios
- 02** Colocación de la tenaza
- 03** Consejos de fijación
- 04** Fijación del dispositivo CowPro
- 05** Acceso videos tutoriales y contacto



**Dispositivo  
CowPro**



**Macho  
doble**



**Cinta de  
seguridad**



**Clip**



**01** Retirar seguro de la Pila

Primero, retire el seguro de la pila. Para hacerlo, abra el tapón, retire el seguro (el círculo negro que se muestra en la ilustración) y vuelva a cerrar el tapón, asegurándose de que quede bien ajustado.

**02** El macho doble

Comience colocando el **macho doble en la aguja de la tenaza**, tal como se muestra en la imagen de referencia. Asegurese de que quede bien ajustado para facilitar el proceso.

**03** El dispositivo CowPro


Coloque el **dispositivo CowPro en la pinza de la tenaza**, verificando que esté **en posición perpendicular** (como se observa en la imagen). Esto es crucial, ya que, si queda en posición vertical, podría desprenderse durante la fijación al animal.

**04** La cinta de seguridad

Tome la **cinta de seguridad y colóquelo por delante del dispositivo CowPro**. Asegúrese de insertar el extremo de la cinta que se ve en la imagen, es decir, el extremo donde hay un punto central y cuatro ranuras de ventilación alrededor del agujero y alinearlos con el agujero del dispositivo.

**05** El clip

Una vez que el dispositivo esté preparado, **localice el clip para tenerlo a mano**. Con todo listo, podrá proceder a fijar el dispositivo al animal.

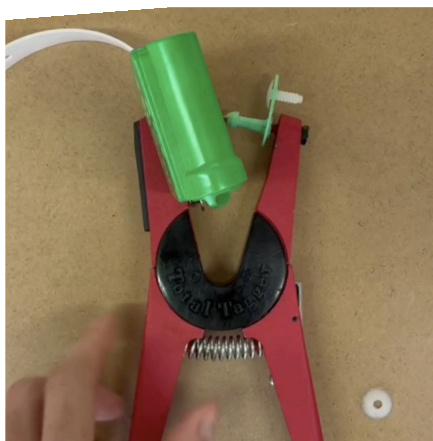



### Identificación de la zona de fijación

Identificar correctamente la zona de fijación del dispositivo reducirá el riesgo de infecciones, desgarros en la oreja y molestias para el animal. **Es crucial evitar venas y arterias para prevenir sangrados e infecciones.**

Identifique el **punto ideal para colocar el dispositivo**. Tiene que estar en una **zona central lo más cerca de la cabeza posible**.



### Procedimientos de Higiene y Seguridad

El uso adecuado de medidas de higiene y seguridad es fundamental para prevenir infecciones y garantizar el bienestar del animal:

#### Higiene de los materiales:

Es recomendable el uso de guantes desechables y mantener las herramientas limpias para reducir el riesgo de contaminación durante el proceso.

#### Higiene del animal:

Limpie la oreja del animal con un desinfectante adecuado para eliminar suciedad y microorganismos.

Una vez colocado el dispositivo, aplique un producto cicatrizante en la zona para promover la curación y minimizar molestias en el animal.

## 01 Preparación del animal

Sujete al animal de forma segura. Idealmente, con la ayuda de otra persona o en una manga.

Posicione la tenaza en la zona previamente identificada de la oreja, asegurándose de que el dispositivo, la cinta de seguridad y el macho doble estén correctamente alineados. Luego, apriete la tenaza con firmeza para perforar la oreja y fijar el dispositivo en su lugar. Este paso debe realizarse de manera rápida y precisa para minimizar el estrés y el dolor del animal.

## 02 Fijación del dispositivo


Pase la cinta de seguridad por encima de la oreja del animal y engánchela al macho doble, eligiendo el agujero más adecuado para lograr un ajuste firme. Asegúrese de que la cinta quede bien apoyada sobre la oreja, sin holguras, para evitar que resbale y garantizar que soporte correctamente parte del peso del dispositivo.

## 03 Sujeción de la cinta de seguridad

Finalmente, asegure la cinta al macho doble con el clip.

## 04 Verificación final

Anote los últimos cuatro dígitos visibles en la parte frontal del dispositivo, junto con el nombre del animal, para poder asociarlos correctamente en la aplicación.

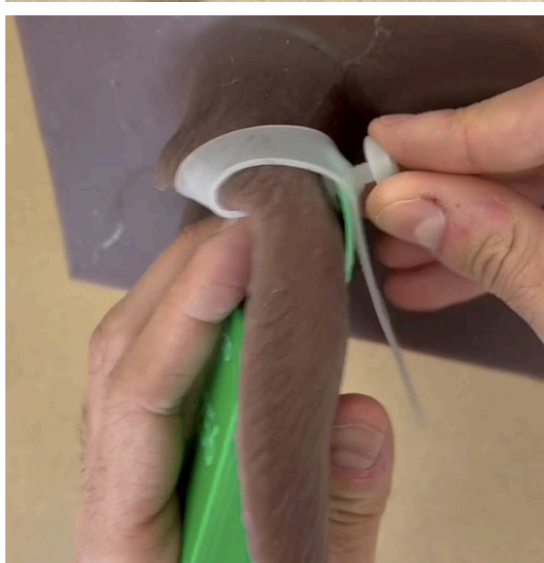



Escaneando los código QR, podrá acceder a un video tutorial que le guiará paso a paso en:



**Cómo preparar el dispositivo CowPro.**



**Cómo fijar el dispositivo CowPro en la oreja.**

**No dudes en contactarnos si tienes cualquier duda o consulta.**



**Mail**

info@ixorigue.com



**WhatsApp**

+34 638 536 231